



ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

аппарата подогрева крови и инфузионных растворов «AMPIRmini»



Работать с системой разрешается только специалистам, прошедшим обучение и изучившим руководство по эксплуатации.



Перед использованием аппарата убедитесь в наличии заряда (зеленый индикатор уровня заряда).



В автоматическом режиме аппарат будет всегда поддерживать температуру 36,6°C



Не используйте режим «АВТО» при трансфузии, так как в процессе нагрева температура теплообменника может достигать 44°C, а также при одновременном использовании 2-х магистралей с разной скоростью инфузии.



Перед подключением кабеля к розетке, убедитесь, что выключатель сети на приборе в положении «0».



Берегите соединительные кабели от повреждений и перегибов. При отключении кабеля тяните только за корпус разъема, не за кабель.



Держите систему в чистоте. При очистке поверхностей применяйте рекомендуемые растворы, избегайте агрессивных средств!



При обнаружении неисправностей выключите систему (отключите ее от электросети) и свяжитесь с сервисной службой. **НЕ ПЫТАЙТЕСЬ** самостоятельно ремонтировать систему.

По всем вопросам обращаться в службу сервиса компании «ТэхатАкси» или в уполномоченную организацию.

Тел. +375 17 375 58 46
tahat.by



Видеоинструкция