




## **Морцеллятор TCM3000VL**

для лапароскопической гистерэктомии

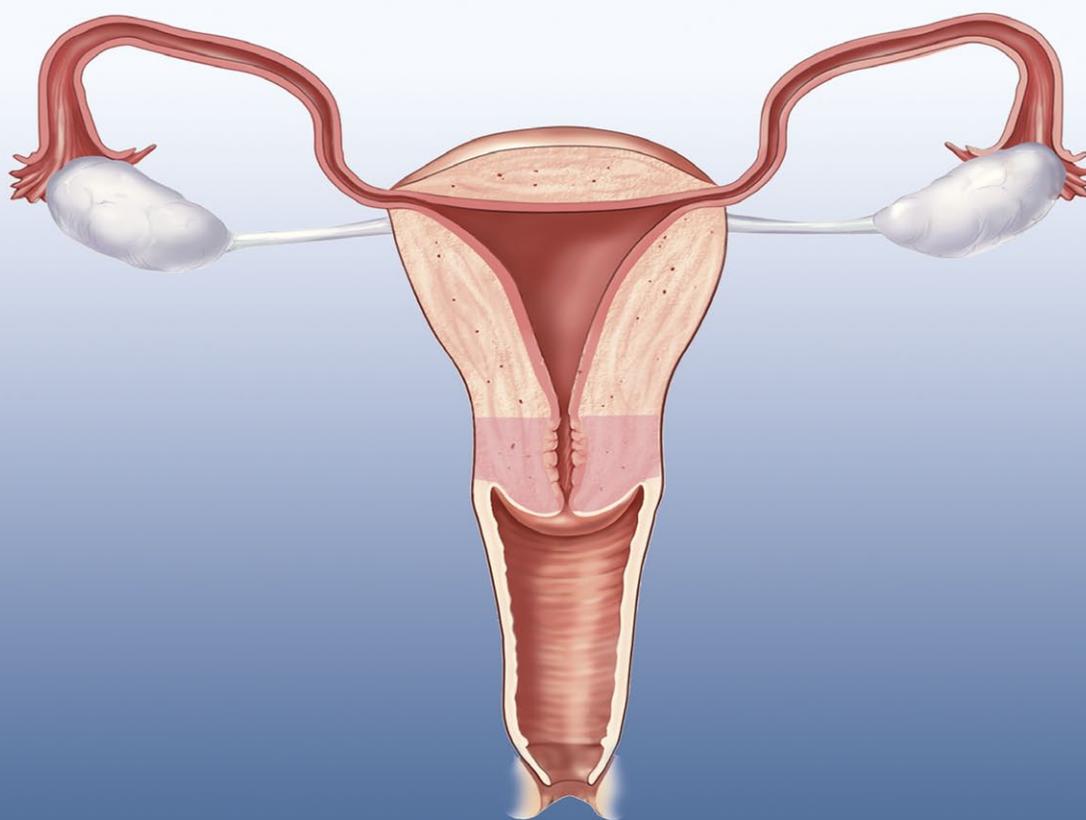

**Морцеллятор Nouvag TCM3000BL** — это новая моторная система с интуитивным дизайном панели управления.

Регулировка скорости и направления вращения лезвия, а также другие параметры отображаются на контрастном дисплее.



- Компактный и легкий в управлении
- Постоянный контроль скорости
- Выбор между 3-мя программами
- Чувствительная педаль управления

Максимальный крутящий момент	80 Нсм
Длина кабеля питания	3 м
Частота вращения	до 1000 об/мин
Размеры (Ш x Г x В)	120 x 180 x 107 мм
Масса	1,8 кг

Выбор эндохирургических инструментов морцеллятора для лапароскопической гистерэктомии позволяет выбрать необходимый инструмент исходя из клинической ситуации. Вы можете выбрать подходящий размер рабочего инструмента в двух вариантах 12 мм и 15 мм, для гигантских миом или пациенток с морбидным ожирением. Высокое качество изготовления и точно подогнанные части морцеллятора Nouvag TCM3000BL гарантируют отличную резку и безопасность при эксплуатации.

### • Тубусы с защитой ткани



**Артикул 5137**

Тубус с защитой, Ø 12 мм



**Артикул 5138**

Тубус с защитой, Ø 15 мм



#### Позиционер ткани

Для предотвращения вращения ткани на конце тубуса с защитой имеется специальный выступ. Также он выступает в роли направляющего элемента.

### • Обтураторы



**Артикул 5152**

Обтуратор, Ø 15 мм



**Артикул 5151**

Обтуратор, Ø 12 мм

### • Лезвия

Уникальное лезвие с лазерной заточкой, не требующей затачивания. Лезвие остается острым на протяжении всего цикла эксплуатации.



**Артикул 5155**

Лезвие, Ø 15 мм



**Артикул 5154**

Лезвие, Ø 12 мм



**Фиксирующий колпачок**

**Артикул 5135**

Лепестковый клапан для лезвий всех диаметров. Упаковка из 10 шт.

**Артикул 5166**

Мембрана для лезвий всех диаметров. Упаковка из 10 шт.

**Фиксатор мембраны**

**Артикул 5163**

Рукоятка морцеллятора, которая через механизм шестерней передает крутящий момент от микромотора к лезвию морцеллятора.

**Фиксирующий колпачок**

**Артикул 5183**

Эргономичная насадка одевается на рукоятку морцеллятора и защищает руку хирурга от избыточного тепла, которое выделяется при работе микромотора.

**Артикул 2090**

Электронный микромотор 21. Автоклавируемый электронный микромотор с длиной кабеля 3 м, обеспечивает достаточный крутящий момент при сохранении плавности хода.

Рисунок 1

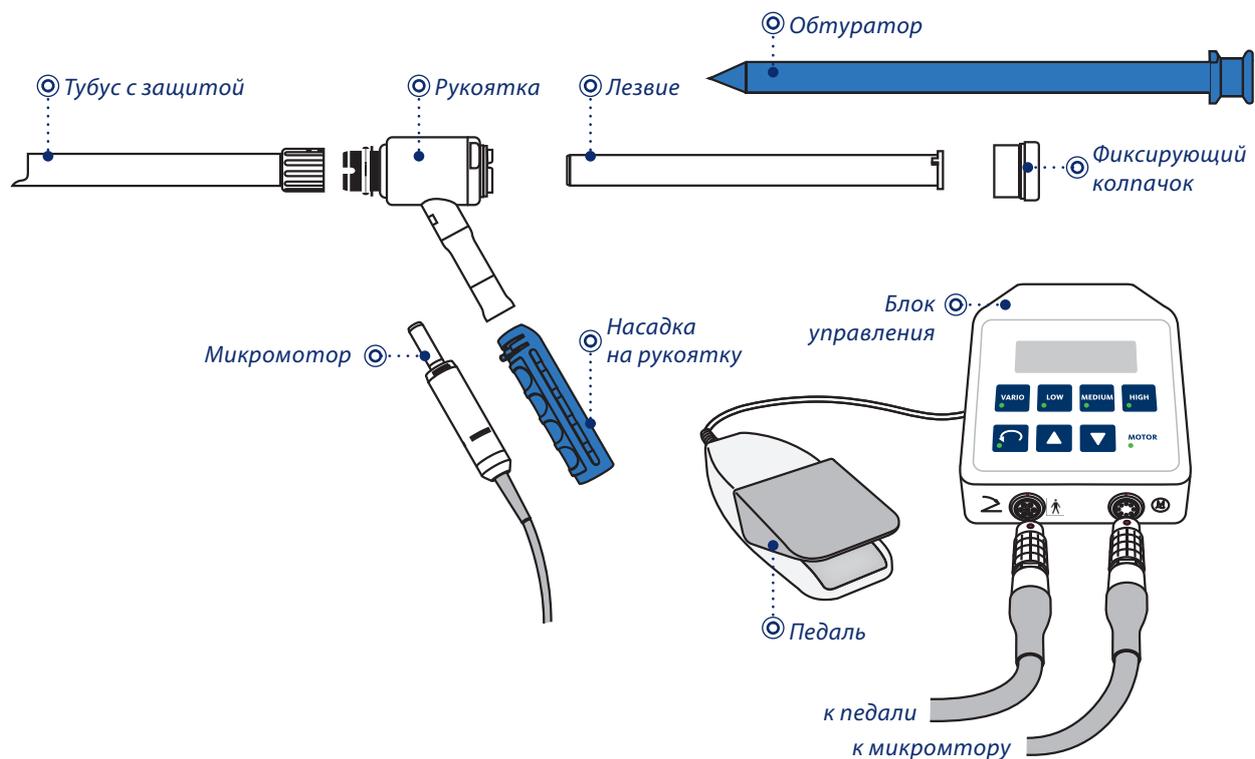


Рисунок 2


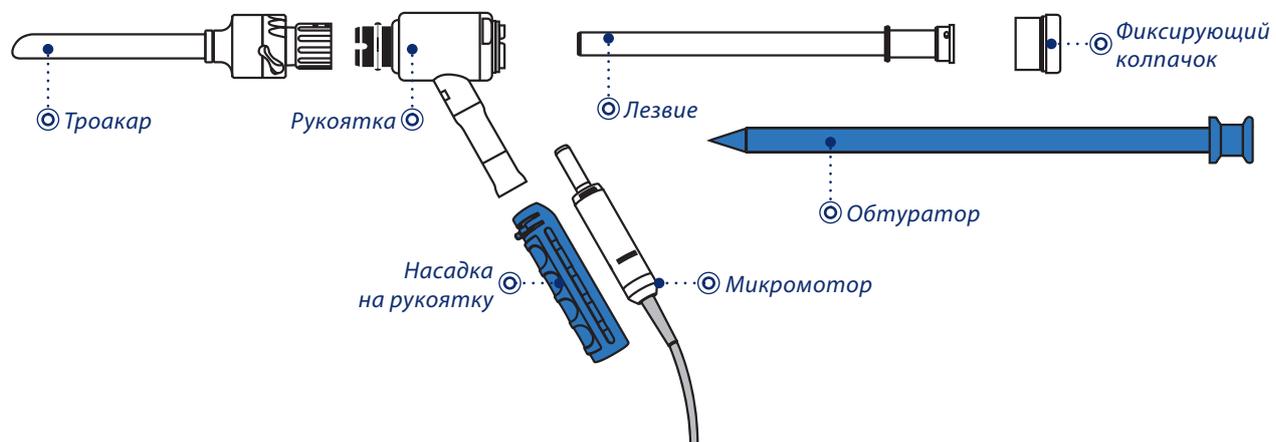


Рисунок 2



## • Троакары

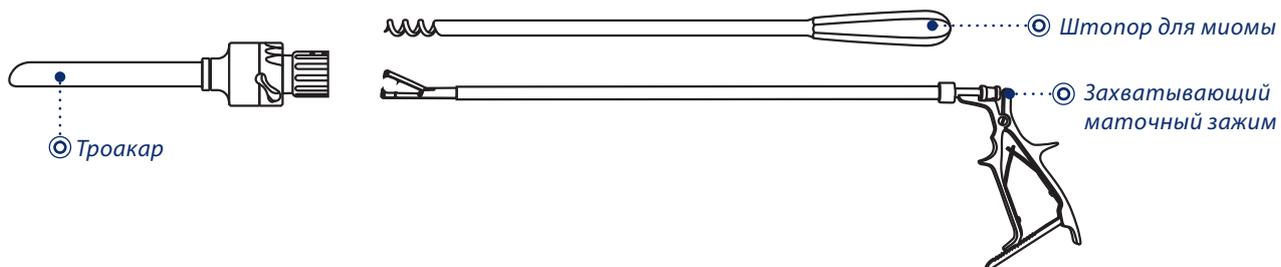

**Артикул 5142**

Троакар, Ø 15 мм

**Артикул 5141**

Троакар, Ø 12 мм


## • Удаление миомы



**Артикул 5193**

Троакар, Ø 20 мм

## • Захватывающие щипцы

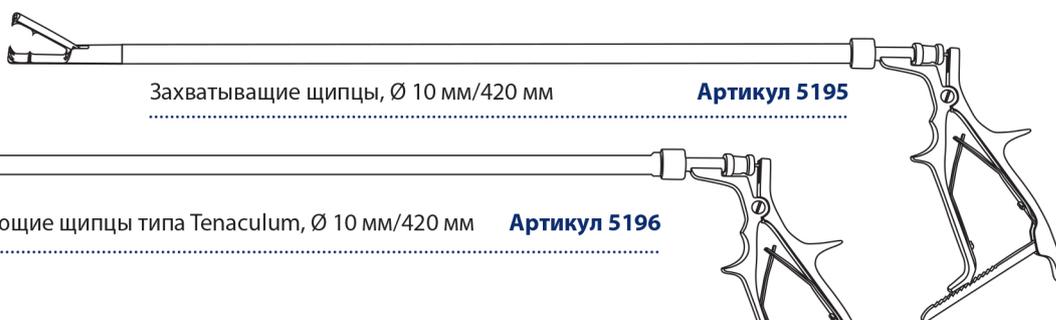


Захватывающие щипцы, Ø 10 мм/420 мм

**Артикул 5195**



Захватывающие щипцы типа Tenaculum, Ø 10 мм/420 мм

**Артикул 5196**

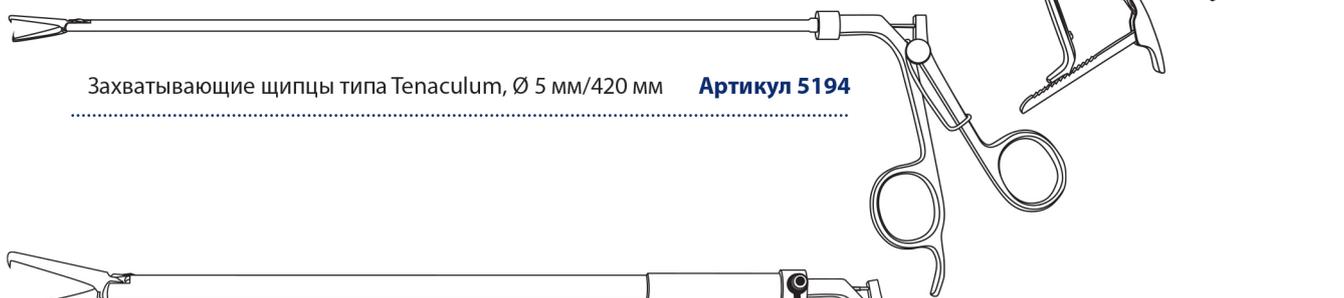

Захватывающие щипцы типа Tenaculum, Ø 5 мм/420 мм

**Артикул 5194**



Захватывающие щипцы типа Tenaculum, Ø 13.5 мм, Ø 15.0 мм/420 мм

**Артикул 5192**

## • Стерилизация и хранение

Контейнер для стерилизации  
инструментария 465 x 280 x 100 мм



**Артикул 4113**

Силиконовая  
подложка  
450 x 270 мм



**Артикул 4113**

Артикул	Наименование	Количество (штук в упаковке)
<b>Моторная система (морцеллятор) Nouvag TCM3000BL, набор, артикул 3287</b>		
3281	Моторная система (морцеллятор) Nouvag TCM3000BL, кабель питания	1
1507	Ножная педаль, кабель питания 3 м	1
2090	Электронный микромотор 21, кабель питания 3 м	1
5163	Рукоятка морцеллятора	1
5183	Защитная насадка на рукоятку	1
1974	Насадка для очистки микромотора 21	1
1928	Насадка для чистки рукоятки морцеллятора	1
<b>Инструментарий</b>		
5137	Тубус с защитой, Ø 12 мм	1
5138	Тубус с защитой, Ø 15 мм	1
5151	Обтуратор, Ø 12 мм	1
5152	Обтуратор, Ø 15 мм	1
5154	Лезвие, Ø 12 мм	1
5155	Лезвие, Ø 15 мм	1
5141	Троакар, Ø 12 мм	1
5142	Троакар, Ø 15 мм	1
5193	Штопор для миомы, Ø 12 мм	1
5192	Захватывающие щипцы типа Tenaculum, диаметр 13.5 мм/15.0 мм, длина 420 мм	1
5194	Захватывающие щипцы типа Tenaculum, диаметр 5.0 мм, длина 420 мм	1
5195	Захватывающие щипцы, диаметр 10.0 мм, длина 420 мм	1
5196	Захватывающие щипцы типа Tenaculum, диаметр 10.0 мм, длина 420 мм	1
4113	Контейнер для стерилизации, 465 x 280 x 100 мм	1
4126	Силиконовая подложка, 450 x 270 мм	1
1984	Спрей для очистки инструментов: микромотора, рукоятки морцеллятора тд.	1
<b>Артикулы запасных частей морцеллятора</b>		
5136	Фиксирующий колпачок	1
5135	Лепестковый клапан для лезвий всех диаметров	10
5166	Мембрана для лезвий всех диаметров	10
5177	Прокладка для тубуса троакаров диаметром 12 мм и 15 мм	10
5180	Прокладка для троакаров диаметром 12 мм и 15 мм	10

# Stormoff®

[info@stormoff.ru](mailto:info@stormoff.ru)

[www.stormoff.ru](http://www.stormoff.ru)

Тел.: +7 (495) 956-05-57