




Морцеллятор TCM3000VL

для лапароскопической гистерэктомии

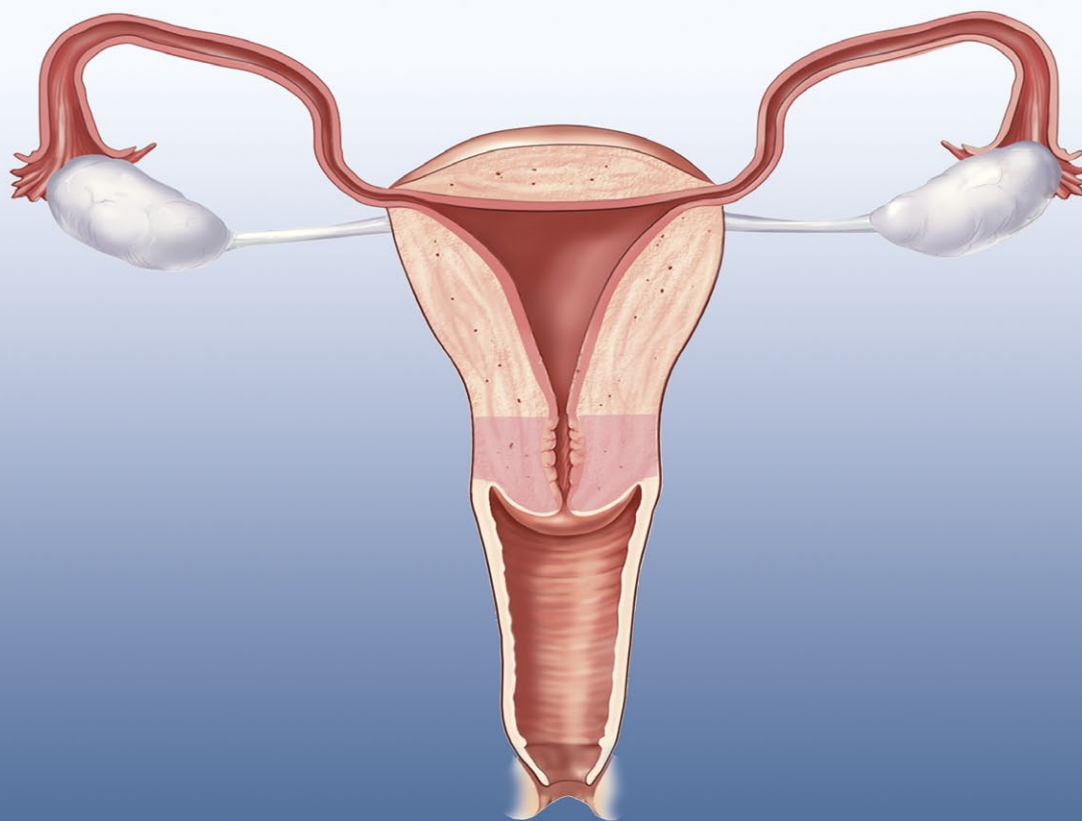

Морцеллятор Nouvag TCM3000BL — это новая моторная система с интуитивным дизайном панели управления.

Регулировка скорости и направления вращения лезвия, а также другие параметры отображаются на контрастном дисплее.



- Компактный и легкий в управлении
- Постоянный контроль скорости
- Выбор между 3-мя программами
- Чувствительная педаль управления

Максимальный крутящий момент	80 Нсм
Длина кабеля питания	3 м
Частота вращения	до 1000 об/мин
Размеры (Ш x Г x В)	120 x 180 x 107 мм
Масса	1,8 кг

Выбор эндохирургических инструментов морцеллятора для лапароскопической гистерэктомии позволяет выбрать необходимый инструмент исходя из клинической ситуации. Вы можете выбрать подходящий размер рабочего инструмента в двух вариантах 12 мм и 15 мм, для гигантских миом или пациенток с морбидным ожирением. Высокое качество изготовления и точно подогнанные части морцеллятора Nouvag TCM3000BL гарантируют отличную резку и безопасность при эксплуатации.

• Тубусы с защитой ткани



Артикул 5137

Тубус с защитой, Ø 12 мм



Артикул 5138

Тубус с защитой, Ø 15 мм



Позиционер ткани

Для предотвращения вращения ткани на конце тубуса с защитой имеется специальный выступ. Также он выступает в роли направляющего элемента.

• Обтураторы



Артикул 5152

Обтуратор, Ø 15 мм



Артикул 5151

Обтуратор, Ø 12 мм

• Лезвия

Уникальное лезвие с лазерной заточкой, не требующей затачивания. Лезвие остается острым на протяжении всего цикла эксплуатации.




Артикул 5155

Лезвие, Ø 15 мм



Артикул 5154

Лезвие, Ø 12 мм

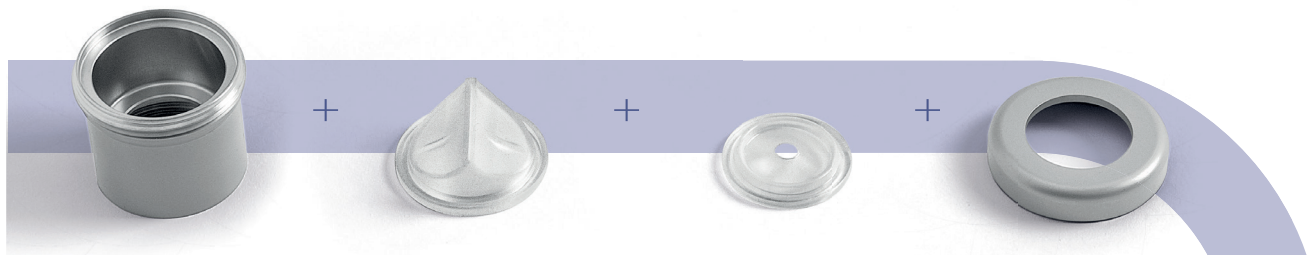

Фиксирующий колпачок

Артикул 5135

Лепестковый клапан для лезвий всех диаметров. Упаковка из 10 шт.

Артикул 5166

Мембрана для лезвий всех диаметров. Упаковка из 10 шт.

Фиксатор мембраны

Артикул 5163

Рукоятка морцеллятора, которая через механизм шестерней передает крутящий момент от микромотора к лезвию морцеллятора.



Фиксирующий колпачок

Артикул 5183

Эргономичная насадка одевается на рукоятку морцеллятора и защищает руку хирурга от избыточного тепла, которое выделяется при работе микромотора.



Артикул 2090

Электронный микромотор 21. Автоклавируемый электронный микромотор с длиной кабеля 3 м, обеспечивает достаточный крутящий момент при сохранении плавности хода.



Рисунок 1

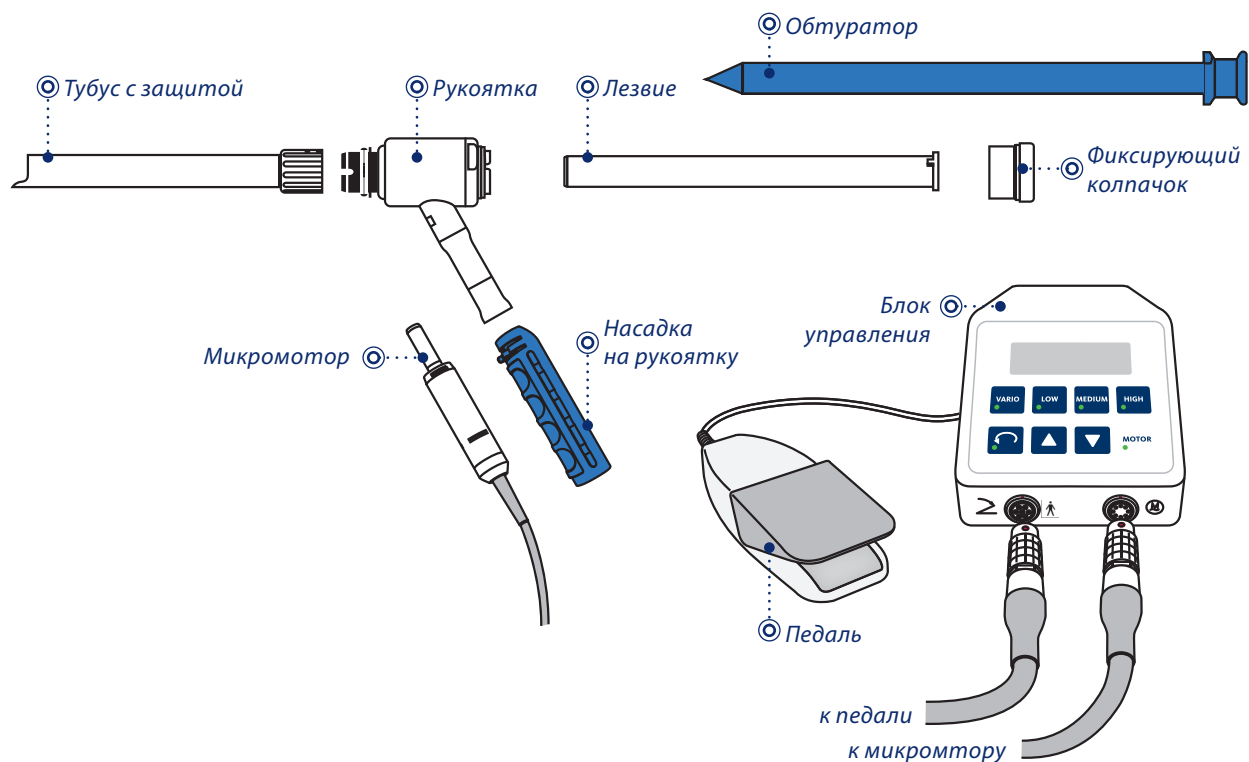


Рисунок 2


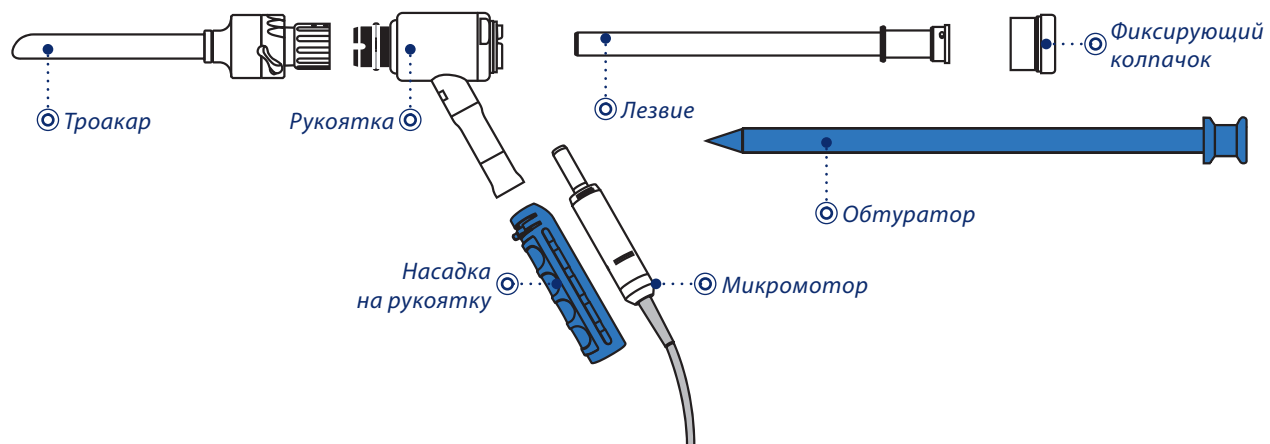


Рисунок 2



• Троакары

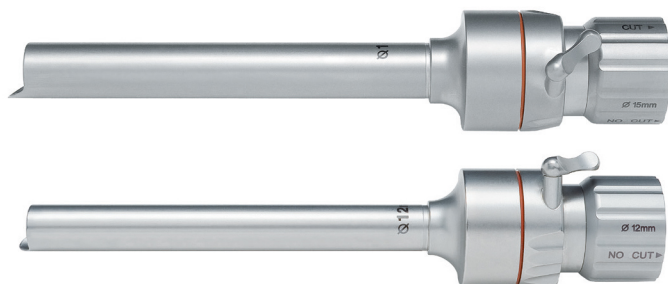

Артикул 5142

Троакар, Ø 15 мм

Артикул 5141

Троакар, Ø 12 мм


• Удаление миомы



Артикул 5193


Троакар, Ø 20 мм

• Захватывающие щипцы

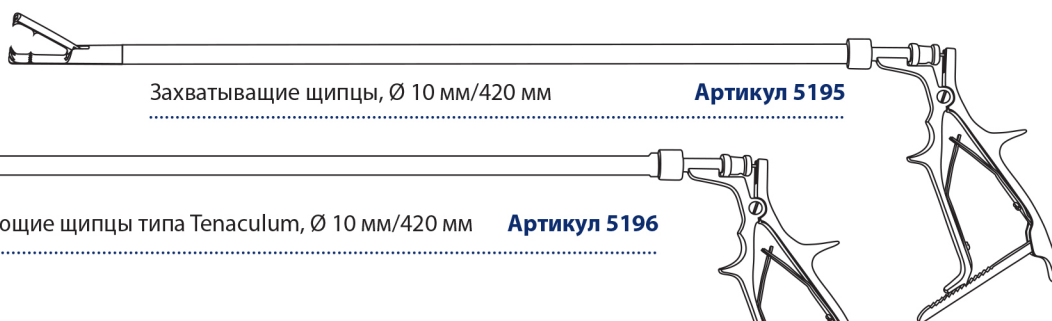

Захватывающие щипцы, Ø 10 мм/420 мм

Артикул 5195

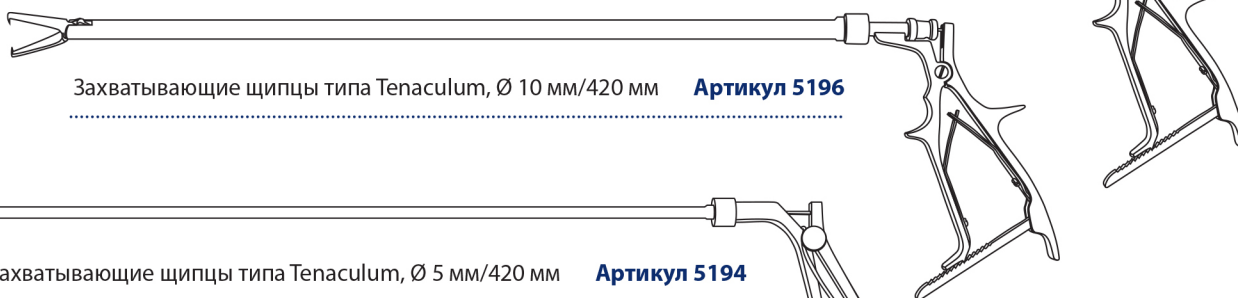

Захватывающие щипцы типа Tenaculum, Ø 10 мм/420 мм

Артикул 5196



Захватывающие щипцы типа Tenaculum, Ø 5 мм/420 мм

Артикул 5194



Захватывающие щипцы типа Tenaculum, Ø 13.5 мм, Ø 15.0 мм/420 мм

Артикул 5192


• Стерилизация и хранение

Контейнер для стерилизации
инструментария 465 x 280 x 100 мм



Артикул 4113

Силиконовая
подложка
450 x 270 мм

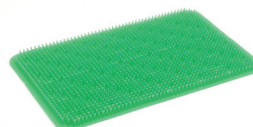

Артикул 4113

Артикул	Наименование	Количество (штук в упаковке)
Моторная система (морцеллятор) Nouvag TCM3000BL, набор, артикул 3287		
3281	Моторная система (морцеллятор) Nouvag TCM3000BL, кабель питания	1
1507	Ножная педаль, кабель питания 3 м	1
2090	Электронный микромотор 21, кабель питания 3 м	1
5163	Рукоятка морцеллятора	1
5183	Защитная насадка на рукоятку	1
1974	Насадка для очистки микромотора 21	1
1928	Насадка для чистки рукоятки морцеллятора	1
Инструментарий		
5137	Тубус с защитой, Ø 12 мм	1
5138	Тубус с защитой, Ø 15 мм	1
5151	Обтуратор, Ø 12 мм	1
5152	Обтуратор, Ø 15 мм	1
5154	Лезвие, Ø 12 мм	1
5155	Лезвие, Ø 15 мм	1
5141	Троакар, Ø 12 мм	1
5142	Троакар, Ø 15 мм	1
5193	Штопор для миомы, Ø 12 мм	1
5192	Захватывающие щипцы типа Tenaculum, диаметр 13.5 мм/15.0 мм, длина 420 мм	1
5194	Захватывающие щипцы типа Tenaculum, диаметр 5.0 мм, длина 420 мм	1
5195	Захватывающие щипцы, диаметр 10.0 мм, длина 420 мм	1
5196	Захватывающие щипцы типа Tenaculum, диаметр 10.0 мм, длина 420 мм	1
4113	Контейнер для стерилизации, 465 x 280 x 100 мм	1
4126	Силиконовая подложка, 450 x 270 мм	1
1984	Спрей для очистки инструментов: микромотора, рукоятки морцеллятора тд.	1
Артикулы запасных частей морцеллятора		
5136	Фиксирующий колпачок	1
5135	Лепестковый клапан для лезвий всех диаметров	10
5166	Мембрана для лезвий всех диаметров	10
5177	Прокладка для тубуса троакаров диаметром 12 мм и 15 мм	10
5180	Прокладка для троакаров диаметром 12 мм и 15 мм	10

Stormoff®

info@stormoff.ru

www.stormoff.ru

Тел.: +7 (495) 956-05-57