

# DIXION ST

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

*Рабочие места оториноларинголога:*

*Dixon ST-E 500*

*Dixon ST-E 600*

*Кресло пациента:*

*Dixon ST-E 250*



**DIXION**

# РАБОЧИЕ МЕСТА ВРАЧА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА

Многофункциональный комплекс DIXION ST — это унифицированное рабочее место врача-оториноларинголога, которое даёт возможность специалисту оказывать пациентам медицинскую помощь в одном кабинете. Удачный выбор ЛОР-комбайна позволит увеличить пропускную способность лечебного кабинета, снизить трудоемкость и повысить эффективность работы отоларинголога.



СВЕТОДИОДНЫЙ  
ОСВЕТИТЕЛЬ




РАСПЫЛИТЕЛИ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ  
СРЕДСТВ

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


ВАТОДЕРЖАТЕЛИ



АСПИРАТОР, ПИСТОЛЕТ  
ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ УХА,  
РУКОЯТКА РАСПЫЛИТЕЛЕЙ

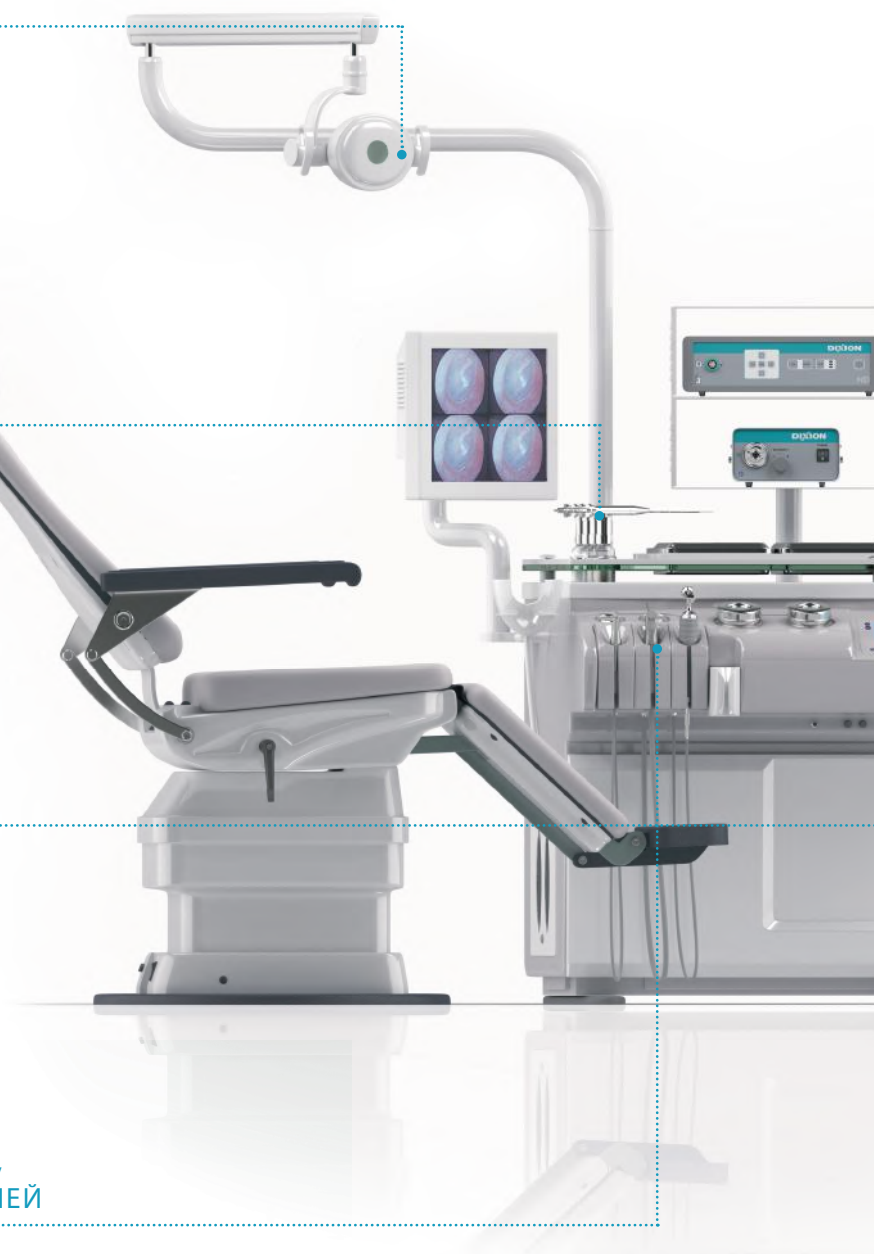



# РАБОЧИЕ МЕСТА ВРАЧА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА

## DIXION ST-E500



- ❖ Осветитель, регулируемый по высоте, углу наклона и повороту
- ❖ Бесшумные компрессор и аспиратор
- ❖ Возможность дооснащения эндоскопическим оборудованием и системой визуализации

## DIXION ST-E600



- ❖ Плавная ручная регулировка давления в распылителе и аспираторе
- ❖ Панель управления осветителем, устройством для подогрева инструментов, эндоскопов и зеркал
- ❖ Возможность дооснащения эндоскопическим оборудованием и системой визуализации

	ST-E500	ST-E600
Осветитель на регулируемом кронштейне	LED	LED
Воздушный компрессор	•	•
Вакуумный насос	•	•
Распылители лекарственных средств	•	•
Устройство для нагрева зеркал и инструментов	•	•
Инструментальные лотки	•	•
Ватодержатель	•	•
Емкость для сбора секрета	•	•
Держатель налобного осветителя	•	•
Стул врача	•	•
Негатоскоп	•	•
Система сброса отходов и использованного инструмента	•	•
Держатель жестких эндоскопов	•	•
Система орошения с подогревом воды: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ирригатор</li> <li>• пистолет для подачи воды/воздуха</li> <li>• тюльпан для промывки полости уха</li> </ul>	•	•
Выдвижная поверхность		•
Увеличенная рабочая поверхность		•
Полка для размещения компьютера		•
Выдвижной ящик		•
Кресло пациента Dixon ST-E250	○	○
Налобный осветитель	○	○
Жесткие эндоскопы	○	○
Система визуализации	○	○

○ - опция

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

## НАЛОБНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ DIXION LED



«холодный» свет - 5500 K



«теплый» свет» - 4000 K

Сфокусированный луч налобного осветителя Dixon LED позволяет врачу увидеть реальную картину состояния тканей, не искаженную рассеянным светом.

- ❖ Светодиодная технология освещения
- ❖ Мощность светодиодной лампы: 3 Вт
- ❖ Срок службы светодиода: 50 000 часов
- ❖ Цветовая температура:
  - модель 1 «холодный» свет — 5500 K
  - модель 2 «теплый» свет» — 4000 K
- ❖ Регулировка освещенности
- ❖ Регулировка диаметра светового пятна
- ❖ Работа осветителя от аккумуляторов
- ❖ Универсальное головное крепление — шлем
- ❖ Беспроводное крепление аккумулятора на шлеме

## СТУЛ ВРАЧА



Стул врача на колесах создает максимум комфорта для специалиста. Обивка стула выполнена из износостойкого материала и выдерживает ежедневную обработку дезинфицирующими средствами.

Устойчивая и надёжная конструкция стула выдерживает нагрузку до 140 килограмм. Модель оснащена вращающимися вокруг своей оси колесами, которые обеспечивают её мобильность на любой поверхности.

Регулировка высоты стула осуществляется при помощи гидравлического механизма.

# КРЕСЛО ПАЦИЕНТА DIXION ST-E250

Удобное электромеханическое кресло для оториноларингологических манипуляций с функциональным дизайном. Подголовник, сиденье и спинка кресла выполнены из прочной искусственной кожи и выдерживают ежедневную обработку дезинфицирующими средствами. Положение «операционный стол» позволяет использовать кресло для оперативных вмешательств.





РЕГУЛИРУЕМЫЙ  
ПОДГОЛОВНИК

*для удобства пациентов*

ВРАЩЕНИЕ КРЕСЛА

*с углом поворота 180°*

НОЖНАЯ ПОДУШКА

*с изменением положения  
в позицию «операционный стол»*

НОЖНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

*для регулировки положения кресла*

**DIXION**

---

Телефоны: +7(495) 780-07-93, 921-44-95, 8 (800) 100-44-95 (звонок бесплатный)

e-mail: [info@dixon.ru](mailto:info@dixon.ru), [www.dixon.ru](http://www.dixon.ru)