

Автоматический коагулометр



SUCCEEDER®

SF-8050

Анализатор, заслуживающий доверия



Гарантия качества и надежности



Загрузка 1000

кювет для эффективной работы анализатора

Оптико-механический метод


детекции сгустка

Меню тестов*

- ПВ — протромбиновое время
- АЧТВ — активное частичное тромбопластиновое время
- Фибриноген
- ТВ — тромбиновое время
- Д-димер
- Антитромбин III
- FDP


Оптический метод детекции

Регистрируется время изменения мутности реакционной смеси

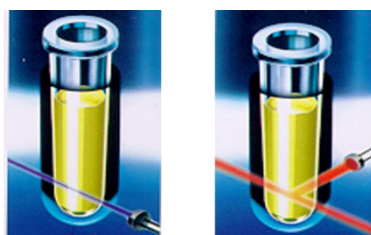

Механический метод детекции

Регистрируется изменение амплитуды колебания шарика

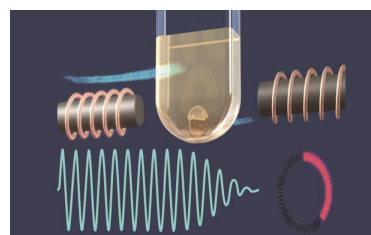

Технические характеристики

Производительность	90 ПВ/час
Количество реагентов на борту	16 реагентов
Одновременная загрузка штативов	3 по 10 проб
Инкубационные каналы	10 каналов
Каналы измерения	6 каналов
Габариты (Д×Ш×В)	700×560×540 мм
Вес	45 кг

Функциональные возможности

- Клоттинговый, хромогенный, турбидиметрический методы
- Отсутствие влияния интерференции (гемолиз, липемия, иктеричность) на детекцию сгустка
- Совместимость с несколькими длинами волн для различных тестов, включая Д-димер, антитромбин III, факторы, протеин С, протеин S и т.д.
- Оптико-механический метод детекции сгустка

Высококачественная технология

- Загрузка 1000 кювет для эффективной работы анализатора
- Возможность постановки на борт нескольких флаконов одного реагента
- Автоматическая перестановка теста при патологическом или сомнительном результате
- Сигнализация о недостаточном объеме расходных материалов
- Автоматическая промывка иглы для предотвращения контаминации
- Быстрый нагрев до 37 °C и автоматический контроль температуры каналов инкубации

Удобное управление пробами

- Определение положения, автоматическая блокировка и индикатор загрузки штатива
- Режим STAT
- Считыватель штрихкода образцов
- Поддержка двусторонней связи с LIS

На анализаторе SF-8050 используются реагенты, контроли, калибраторы и расходные материалы производства Beijing Succeder Technology Inc.

- Наличие ID-карты в наборе реагентов: автоматическое считывание лота, срока годности, калибровочной кривой и другой информации
- Системные промывающие растворы доставляются в виде концентрат
- Считыватель штрихкодов реагентов, автоматическое распознавание типа и положения реагента

* Ожидается расширение перечня тестов





Stormoff

Оснащение медицинских учреждений

**www.stormoff.ru
lab@stormoff.ru**

**+7 (495) 780-07-95
+7 (495) 956-05-57**