


# V-Chromer® III

Автоматический стейнер для окраски

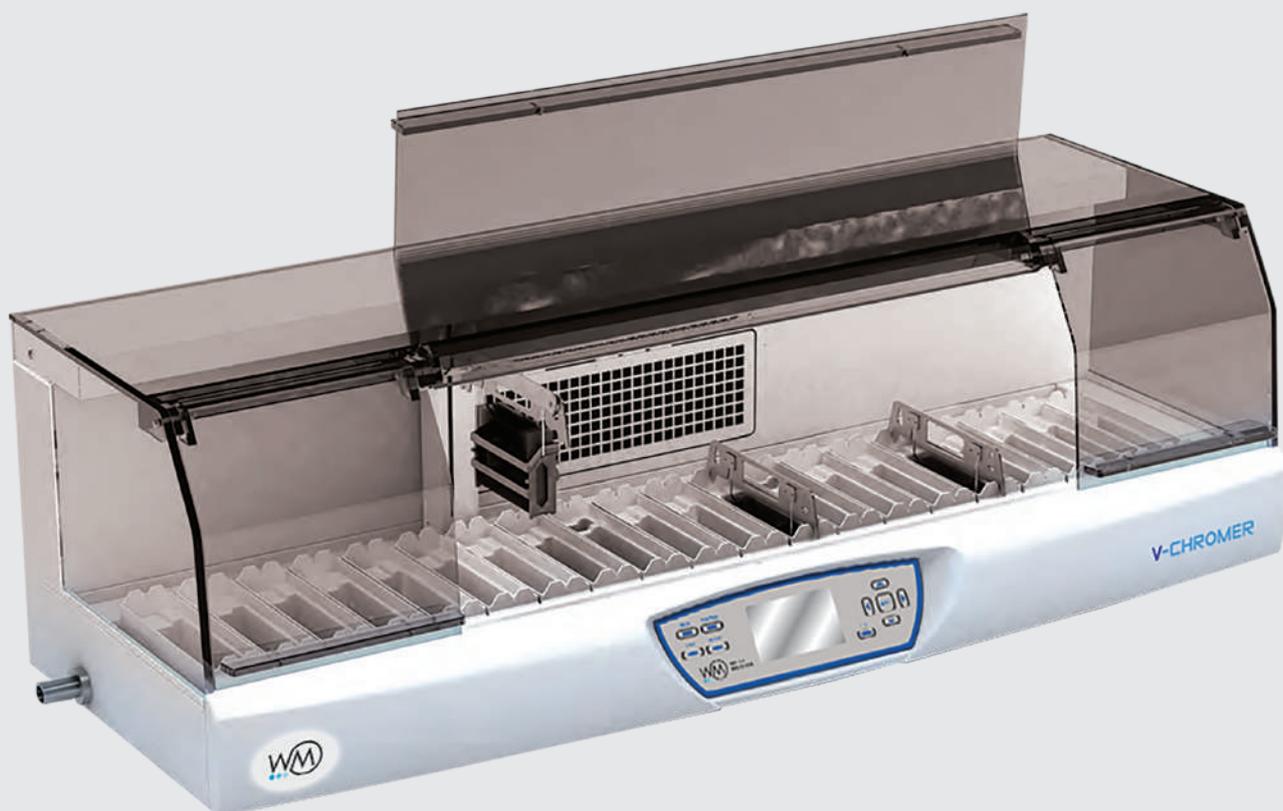

# Стандартизованная окраска микроскопических препаратов



Эффективное решение для проведения цитологических исследований мазков, необходимых в рамках диспансеризации женщин согласно разделу II Постановления Правительства РФ от 28 декабря 2023 г. №2353

## Автоматизация окраски препаратов Настраиваемые протоколы окраски

### Применение

Цитология  
Гематология  
Микробиология  
Гистология

### Протоколы окраски

Папаниколау  
Паппенгейм  
Лейшман  
Романовский-Гимза  
Циль-Нильсен  
Грам и другие

### Преимущества V-Chromer® III

- Открытая система для использования красок различных производителей
- Одновременная загрузка нескольких держателей со слайдами
- Одновременная окраска по нескольким протоколам
- Совместим с аппаратами для заключения под покровные стекла
- Дисплей для управления процессом окраски
- Нейтрализация испарений и запахов благодаря угольному фильтру
- Не требуется вытяжной шкаф
- Защита персонала при работе с красящими веществами

### Высокая производительность



Загрузка до 30 слайдов в штатив



До 18 доступных емкостей для реагентов

# Универсальный автоматический мультитейнер



- 1 штатив со стеклами
- 2 держатель штативов
- 3 емкость для реагентов
- 4 дисплей и клавиши управления
- 5 секционная дверца

## Окрашивание проводится в 3 простых действия



Поместите слайды в держатель стейнера



Запустите автоматический цикл покраски



Получите стандартизовано окрашенные препараты

## Спецификации

Реагенты	открытая система для использования красок различных производителей
Загрузка слайдов	одновременная загрузка до 5 держателей, до 30 слайдов каждый
Количество программ	до 2 одновременно используемых программ, каждая до 50 этапов окраски
Количество реагентов	до 52 (32 предустановленных и 20 настраиваемых)
Время окраски	от 1 секунды до 59 минут 59 секунд на каждый этап окраски
Общее количество емкостей	20
Емкости для реагентов	до 18, объем 300 мл
Емкости для промывки	до 3
Емкости для сушки	1, температура 30–70 °C
Поглощение испарений	встроенная система поглощения испарений/запахов с угольным фильтром
Питание	100–240 В / 50–60 Гц
Питание от батареи	до 2 часов
Дисплей	ЖК, 4/3 дюйма
Тип прибора	мультистейнер

## Информация для заказа

<b>V-Chromer® III</b> Автоматический мультистейнер	80.0003.03
---	------------

Проверьте целевое использование и наличие регистрации в законодательстве вашего региона.  
В зависимости от правил определенного региона, некоторые продукты могут использоваться только в исследовательских целях.  
Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



**Stormoff®**

[histo@stormoff.com](mailto:histo@stormoff.com)

[www.stormoff.ru](http://www.stormoff.ru)

+7 (495) 956-05-57