

## Дыхательные системы линейки\* аппаратов Primus®

Порядок разборки и сборки



### Разборка

**1** Отвинтите три винта на аппарате ИВЛ шестигранным ключом.

**9** Закрутите три винта на аппарате ИВЛ шестигранным ключом.

**2** Потяните дыхательную систему за ручку вверх и наружу.

**8** С помощью ручки вставьте дыхательную систему в крепежное приспособление.

**3** Снимите верхнюю диафрагму аппарата.

**7** Вставьте диафрагму аппарата таким образом, чтобы сверху было видно надпись Dräger.

**4** Снимите абсорбер CO<sub>2</sub> CLIC. Открутите CLIC адаптер (опционально).

**6** Зафиксируйте винтами CLIC адаптер (опционально). Установите абсорбер CO<sub>2</sub> CLIC.

**5** Вставьте чистящий диск в адаптер. Закройте адаптер до щелчка.

**5** Извлеките чистящий диск из адаптера. Закройте адаптер до щелчка.

**6** Отвинтите форсунки вдоха и выдоха и вытяните их.

**4** Установите форсунки вдоха и выдоха и плотно закрутите.

**7** Снимите оба датчика потока.

**3** Вставьте оба датчика потока.

**8** Отверткой отвинтите пять винтов на дыхательном аппарате и снимите крышку.

**2** Установите крышку на дыхательный аппарат и отверткой закрутите пять винтов.

**9** Поднимите среднюю часть дыхательного аппарата.

**1** Установите среднюю часть дыхательного аппарата на дно корпуса.

\* Primus Infinity Empowered, Primus, Pallas, Apollo

**Сборка**


# Дыхательные системы линейки\* аппаратов Primus®

## Инструкции по повторной обработке



	Ручная очистка и дезинфекция	Автоматическая очистка и дезинфекция	Стерилизация
	✗	✓	✓
	✓	✗	✗
	✓	✗	✓

### Визуальный осмотр

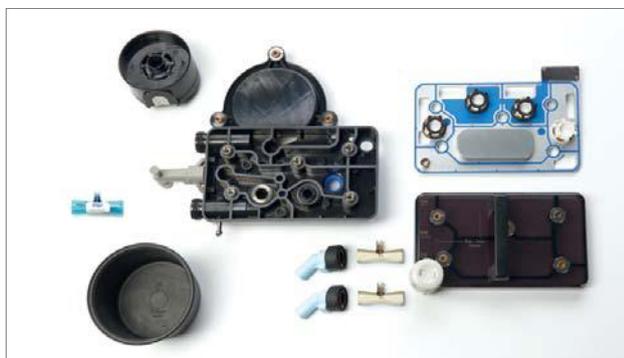

#### Иммерсионная дезинфекция:

Используйте только дезинфицирующие препараты, перечисленные в инструкции по эксплуатации датчиков потока Dräger.

#### Автоматическая очистка и дезинфекция:

Расположите элементы таким образом, чтобы обеспечить хорошее промывание внутренних пространств и поверхностей и свободный отток воды.

#### Стерилизация:

Стерилизация датчиков потока SpiroLife® плазмой или облучением запрещена.

Данные рекомендации не отменяют инструкции по применению и не являются ее заменой.