

## Dräger DrugTest 5000 Наркотестер

Простой отбор, отсутствие контакта с образцом и малое время ожидания: никогда прежде тест на наркотические вещества не совершался так быстро и просто, как с Dräger DrugTest 5000. Гарантия достоверности результата - автоматический анализ на месте сразу после отбора пробы.



## Преимущества

---

### Тест на наркотики с отбором проб и анализом в одной системе

Система тестирования на наркотики Dräger DrugTest 5000 состоит из тест-кассеты Dräger DrugTest 5000 Test Kit и анализатора Dräger DrugTest 5000 Analyzer. Эта система предоставляет вам все необходимое для скрининга как в медучреждении, так и на объекте. Dräger DrugTest 5000 сразу покажет, находится ли человек под действием наркотиков.

---

### Готов к немедленному использованию

Тест-кассеты Dräger DrugTest 5000 всегда готовы к использованию. Хотите проверить подозреваемого? Просто снимите крышку и передайте пробоотборник испытуемому.

---

### Простое и безопасное управление

Для управления анализатором вам понадобятся всего три кнопки. Выбор операции осуществляется через меню. Просто следуйте текстовым инструкциям на дисплее.

---

### Гигиеничный и безболезненный пробоотбор слюны

Испытуемый вводит верхнюю часть пробоотборника в ротовую полость и совершает жевательные движения, пока встроенный индикатор не становится синим, что сигнализирует о завершении пробоотбора. Обычно это занимает от одной до четырех минут. Затем испытуемый возвращает вам закрытую тест-кассету, что гарантирует отсутствие контакта с пробой слюны.

---

### Мгновенные результаты

Анализ слюны начинается сразу после пробоотбора, достаточно вставить тест-кассету и картридж в анализатор. Все операции выполняются автоматически, позволяя вам дальше заниматься испытуемым. Через несколько минут на экране появится результат.

---

### Точные результаты

Результат измерения отображается в виде полнотекстовых сообщений, благодаря чему невозможно двусмысленное толкование. Более подробная информация может быть добавлена с помощью внешней клавиатуры, сохранена или распечатана с помощью Dräger Mobile Printer (опция).

---

### Дополнительные преимущества Dräger DrugTest 5000 Test Kit:

- высокая степень совпадения с результатами анализа образцов крови и пределы обнаружения, актуальные для Германии (подтверждено полевыми испытаниями Немецкого университета полиции)
- низкий предел обнаружения для ТНС как основного активного вещества каннабиноидов
- простое управление – даже при работе в перчатках

## Преимущества

- работает от напряжения 230 В или 12 В автомобильной сети
- легко транспортируется, весит 4,5 кг (в наличии имеется сумка для переноски или прочный кейс для транспортировки)
- наличие различных конфигураций (возможность одновременного выявления нескольких веществ в зависимости от типа тест-кассет)
- возможность эксплуатации при температуре от 4 до 40 °С
- возможность хранения в оригинальной упаковке при температуре до 30 °С

---

### Надежный скрининг наркотиков

Система может обнаруживать до восьми веществ/классов веществ с заранее определенными пределами обнаружения (пороги):

- амфетамины
- бензодиазепины
- дельта-9-тетрагидроканнабиол (THC (каннабис))
- кокаин
- метамфетамины
- опиаты
- метадон
- кетамин

---

### Dräger SSK 5000: для обнаружения наркотиков на поверхностях или в веществах

Хотите проверить автомобиль на наличие следов от наркотиков или изучить содержимое подозрительного пакета? Просто возьмите пробу с помощью Dräger SSK 5000 и перенесите её в тест-кассету Dräger DrugTest 5000 Test Kit. Затем вы можете исследовать пробу в анализаторе Dräger DrugTest 5000 Analyzer.

## Принадлежности



### Компактная клавиатура

- с интерфейсом PS2, прил. 28,2 x 13,2 x 2,4 см.
- „QWERTZ“ – немецкая раскладка, №: 8315095
- „QWERTY“ – английская раскладка, №: 8315497
- „AZERTY“ – французская раскладка, №: 8315142



### Портативный принтер Dräger Mobile Printer

Портативный принтер Dräger Mobile Printer распечатывает результаты измерений на алкоголь и на наркотики и работает на 4 батареях AA, не требуя дополнительного источника питания.

№: 8319310



### Транспортировочный кейс для анализатора Dräger DrugTest 5000

№: 8322675



### Ящик для транспортировки

№: 8319925

## Однородные продукты

ST-13226-2007



### Dräger DCD 5000

Простое, быстрое и надежное обнаружение алкоголя и наркотиков: Комплект для сбора слюны Dräger DCD 5000 обеспечивает простой отбор ротовой жидкости, её хранение и дальнейшую отправку в лабораторию для анализа, исключая при этом фальсификацию.

D-74696-2013



### Dräger Alcotest® 6820

Обеспечение безопасности на дорогах и отсутствие нетрезвых водителей на них – непредсказуемая и напряженная работа. Компания Dräger разработала ручной алкотестер Alcotest® 6820 специально для нужд сотрудников полиции. Он прост в использовании и быстро выдает надежные показания в сложнейших условиях, когда на счету каждая секунда.

ST-15093-2008



### Dräger Alcotest® 7510

Dräger Alcotest® 7510 – это компактный и надежный ручной прибор для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе. Это устройство идеально подходит для правоохранительных органов, а также для коммерческого или промышленного сектора. Во многих странах Alcotest® 7510 может использоваться в качестве доказательственного прибора.

## Технические характеристики

|                     |  |
|---------------------|--|
| Рабочее напряжение  | 12 В   |
| Ток                 | 3 А  |
| Размеры (Ш x В x Г) | 200 x 260 x 250 мм   |
| Вес                 | 4,5 кг   |
| Рабочие условия     | Эксплуатация: от 4 до 40 °С<br>при хранении/транспортировке: от -20 до +60 °С<br>отн. влажность: от 5 до 95 % (без конденсации)  |
| Интерфейсы          | оптический для принтера, PS/2, USB Slave   |
| Время измерения:    | зависит от используемого тест-комплекта (обычно < 9 минут)<br>опционально: анализ за < 5 минут при повышении порогового значения ТНС до 25 нг/мл (после обновления программного обеспечения прибора) |
| Емкость памяти      | 500 результатов измерения  |
| Аттестации          | ПУ ФСЗ 2009/05877 ГОСТ Р 52319-2005; ГОСТ Р 51522-99; ГОСТ Р 50444-92  |

## Спецификация заказа

| Описание  | IVD/ Non-IVD | Упаковка     | Код заказа |
|---|--------------|--------------|------------|
| Анализатор с блоком питания (83 15 675) и автомобильный кабель 12 В                             | IVD          | 1 анализатор | 83 19 900  |
| Анализатор с блоком питания (83 15 675)   | Non-IVD      | 1 анализатор | 83 23 605  |
| Испытательный комплект для 8 веществ*<br>СОС, ОРІ, ВЗО, ТНС, АМР, МЕТ, МТД, КЕТ                 | IVD          | 20 шт.       | 83 23 646  |
| Испытательный комплект для 7 веществ*<br>СОС, ОРІ, ВЗО, ТНС, АМР, МЕТ, МТД                      | IVD          | 20 шт.       | 83 23 156  |
| СОС, ОРІ, ВЗО, ТНС, АМР, МЕТ, МТД   | Non-IVD      | 20 шт.       | 83 23 636  |
| Испытательный комплект для 6 веществ*<br>СОС, ОРІ, ВЗО, ТНС, АМР, МЕТ                           | IVD          | 20 шт.       | 83 19 830  |
| СОС, ОРІ, ВЗО, ТНС, АМР, МЕТ  | Non-IVD      | 20 шт.       | 83 19 965  |
| Испытательный комплект для 5 веществ<br>*СОС, ОРІ, ТНС, АМР, МЕТ                                | IVD          | 20 шт.       | 83 23 439  |
| СОС, ОРІ, ТНС, АМР, МЕТ   | Non-IVD      | 20 шт.       | 83 21 350  |
| Испытательный комплект для обучения<br>(6 тест-кассет каждый)<br>Учебный испытательный комплект |              | 6 шт.        | 83 23 640  |

## Спецификация заказа

(3 x положительных;  
3 x отрицательных)

|   |        |           |
|---|--------|-----------|
| Dräger SSK 5000   | 20 шт. | 83 20 490 |
| Компактная клавиатура,<br>немецкая раскладка<br>(„QWERTZ“)                    | 1 шт.  | 83 15 095 |
| Компактная клавиатура,<br>английская раскладка<br>(„QWERTY“)                  | 1 шт.  | 83 15 497 |
| Компактная клавиатура,<br>французская раскладка<br>(„AZERTY“)                 | 1 шт.  | 83 15 142 |
| Сканер штрих-кода   | 1 шт.  | AG 02 491 |
| Портативный принтер Dräger<br>Mobile Printer                                  | 1 шт.  | 83 19 310 |
| Транспортировочный кейс для<br>анализатора DrugTest 5000 и<br>принадлежностей | 1 шт.  | 83 22 675 |
| Жесткий транспортировочный<br>кейс для анализатора DrugTest<br>5000 Analyzer  | 1 шт.  | 83 25 333 |

\*СОС: кокаин – \*ОПИ: опиаты – \*ВЗО: бензодиазепины – \*ТНС: марихуана – \*АМФ: амфетамин – \*МЕТ: метамфетамин – \*МТД: метадон – \*КЕТ: кетамин

## Примечания

### Примечание

Представленная в данной брошюре информация носит справочный характер. Сведения об актуальной спецификации, технических характеристиках и др. уточняйте у представителя производителя или дистрибьютора.

**Штаб-квартира**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Германия  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**РОССИЯ**  
ООО «Дрегер»  
Преображенская площадь, д.8.  
Бизнес Центр ПРЕО8,  
блок «Б», 12 этаж  
Москва, Россия, 107061  
Тел +7 495 775 15-20  
Факс +7 495 775 15-21  
[info.russia@draeger.com](mailto:info.russia@draeger.com)

**Сервисный центр**  
ул. Новохоловская, д.23,  
стр.1  
Москва, Россия, 109052  
Тел +7 495 775 15-20  
[service.russia@draeger.com](mailto:service.russia@draeger.com)

Найдите вашего  
регионального торгового  
представителя на:  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)

